



Kitfort

УДОВОЛЬСТВИЕ
В ЗАБОТЕ!



Penguin Pack
Массажер для шеи
КТ-2996

kitfort.ru





Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам





Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	5
Устройство массажера для шеи.....	6
Подготовка к работе и использование.....	8
Чистка и обслуживание	13
Уход и хранение.....	13
Устранение неполадок	14
Технические характеристики	17
Меры предосторожности.....	18
Другие товары Kitfort.....	21



Общие сведения

Массажер для шеи КТ-2996 выполняет массаж шеи электрическими импульсами. Микротоковая стимуляция и воздействие теплом стимулируют мышцы шеи и повышают тонус, расслабляют и снимают усталость, напряжение и болевые ощущения, а также улучшают циркуляцию крови. Благодаря нагреву эффективность массажа повышается и достигается лучшее расслабление мышц шеи. Расслабление мышц шеи и улучшение кровотока также помогают избавиться от головных болей и проблем со сном. Такой массажер отлично подойдет для тех, кто подолгу работает за компьютером или часто испытывает дискомфорт и усталость в области шеи.

У массажера 6 режимов работы: первый и второй комбинированные режимы, восстановительный, расслабляющий, разминающий и перкуссионный массаж. Первый комбинированный режим каждую минуту циклически переключает восстановительный, расслабляющий и разминающий массаж, а второй комбинированный режим — восстановительный, расслабляющий и перкуссионный массаж. В каждом режиме вы можете настроить интенсивность воздействия от слабой (1) до сильной (16). В каждом режиме вы можете отключить или включить нагрев и выбрать один из трех уровней нагрева. Также можно включить только нагрев, без электрических импульсов. Благодаря большому количеству настроек вы точно подберете массаж, который подходит вам лучше всего.

Массажер оснащен голосовым сопровождением — при нажатии на кнопку «Вкл/Выкл» и «Режим», низком уровне заряда аккумулятора и отключении массажер подает звуковые команды, сообщая о выбранном режиме, установленной интенсивности воздействия и уровне нагрева.

Рекомендуемая продолжительность сеанса массажа составляет 15 минут. Через 15 минут массажер автоматически отключается. Если включена только функция нагрева, массажер также отключится через 15 минут. Не проводите более одного сеанса массажа подряд и более двух сеансов в день.

В комплект входят две электродные накладки, которые аналогично массажеру выполняют массаж электрическими импульсами, но более компактные и подходят для использования на разных частях тела, кроме зоны сердца, лимфоузлов, лица и интимных зон. Управление электро-

Массажер для шеи КТ-2996

дными накладками осуществляется с помощью массажера, однако нагрев при использовании электродных накладок не включается.

Следует помнить, что при наличии противопоказаний или заболеваний необходимо проконсультироваться с лечащим врачом. Массажер для шеи КТ-2996 не является медицинским прибором и используется только в профилактических целях. Также массажер можно использовать только при отсутствии каких-либо повреждений кожи в области шеи, например ран, царапин или аллергических высыпаний.

Массажер очень компактный, легкий и работает от аккумулятора, что позволяет брать его с собой на работу, в поездки или путешествия.


Комплектация

1. Массажер — 1 шт.
2. Шнур Micro-USB — 1 шт.
3. Электродная накладка — 2 шт.
4. Шнур Micro-USB для электродных накладок — 1 шт.
5. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
6. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально



Устройство массажера

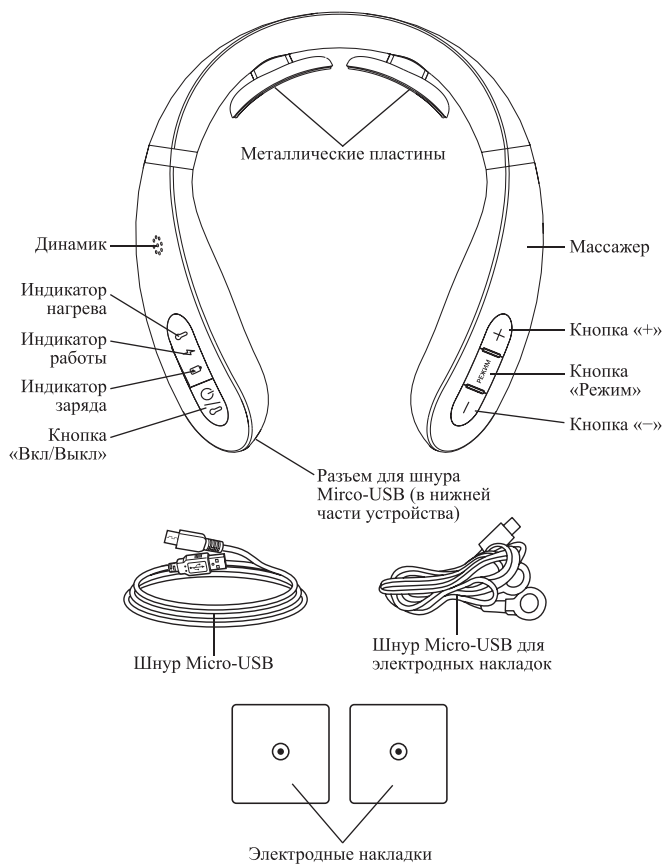

Кнопка «Вкл/Выкл» включает массажер и нагрев, а также переключает уровни нагрева:

- Первое нажатие — включает массажер;
- Второе нажатие — включает нагрев на среднем уровне (при этом загорается **индикатор нагрева**);
- Третье нажатие — включает нагрев на высоком уровне;
- Четвертое нажатие — отключает нагрев (индикатор нагрева гаснет);
- Пятое нажатие — включает нагрев на низком уровне, и далее циклически.

Выбор каждого из уровней нагрева сопровождается голосовыми командами. На низком уровне температура нагрева 38 ± 3 °С, на среднем уровне — 40 ± 3 °С, на высоком уровне — 42 ± 3 °С.

Для выключения массажера необходимо нажать и удерживать кнопку «Вкл/Выкл» в течение 2 секунд, прозвучит звуковая команда: «Массаж окончен».

Кнопка «Режим» переключает 6 режимов работы:

- первый комбинированный режим: восстановительный, расслабляющий и разминающий массажи будут циклически переключаться каждую минуту.
- второй комбинированный режим: восстановительный, расслабляющий и перкуссионный массажи будут циклически переключаться каждую минуту.
- восстановительный массаж вызывает прилив крови к зоне массажа, улучшает кровообращение и отток лимфы, помогает в борьбе с бессонницей и головной болью;
- расслабляющий массаж снимает напряжение после долгой работы в сидячем положении или неудобной позы во время сна;
- разминающий массаж воздействует на мышцы, повышает их тонус, снимает напряжение и улучшает кровообращение;
- перкуссионный массаж по ощущениям напоминает массаж постукиванием, расслабляет мышцы после тренировок.

Кнопки «+» и «-» настраивают интенсивность воздействия от слабой (1) до максимальной (16).

Примечание. При интенсивности воздействия 0 электрических импульсов не будет.



Индикатор нагрева горит, когда нагрев включен. При отключении нагрева индикатор гаснет.

Индикатор работы горит, когда массажер включен.

Индикатор заряда во время зарядки мигает. Когда массажер полностью зарядится, индикатор заряда начнет гореть непрерывно. Во время работы массажера индикатор заряда не горит. При низком уровне заряда прозвучит голосовая команда о необходимости зарядки аккумулятора, через 3–10 минут массажер выключится.

Если вы хотите отключить голосовые команды, нажмите на кнопку «Режим» и удерживайте ее в течение 2–3 секунд. Чтобы включить голосовые команды, снова нажмите на кнопку «Режим» и удерживайте ее в течение 2–3 секунд.

Электродные накладки подходят для массажа любой части тела, кроме зоны сердца, лимфоузлов, лица и интимных зон. Чтобы их использовать, возьмите **шнур Micro-USB для электродных накладок** и вставьте в разъем для шнура на массажере, а затем соедините с электродными накладками с другой стороны. Управление массажем с использованием накладок осуществляется с помощью массажера.

Примечание. Нагрев при использовании электродных накладок не включается.



Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте массажер и аксессуары, снимите защитную пленку с металлических пластин. Перед первым использованием протрите массажер влажной мягкой тканью и зарядите, как это описано в главе «Зарядка массажера».

Зарядка массажера

Если при работе массажера подается голосовая команда «Низкий уровень заряда, зарядите массажер», у аккумулятора низкий заряд. В этом случае рекомендуется начать зарядку аккумулятора. Если при включении устройство не работает, значит, аккумулятор разрядился полностью.

Для зарядки подходит шнур Micro-USB из комплекта. Вы можете использовать другой некомплектный шнур Micro-USB, рассчитанный на ток 1 А. Для зарядки устройства рекомендуется использовать блок питания с USB-разъемом и выходными параметрами: ~ 5 В, 1 А. Также зарядить устройство можно от сторонних источников питания: ноутбука, пауэрбанка и др.

Когда аккумулятор заряжается, индикатор заряда мигает. При полном заряде индикатор горит непрерывно. Обычное время зарядки аккумулятора составляет примерно 2 часа. Вы можете заряжать аккумулятор с любым уровнем разряженности — перед зарядкой не требуется предварительной полной разрядки аккумулятора. Во время зарядки вы не сможете пользоваться массажером.

Зарядка аккумулятора должна производиться при температуре от 5 до 40 °С. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 45 °С.

Использование массажера

1. Перед выполнением массажа убедитесь, что кожа шеи и металлические пластины чистые. Если у вас длинные волосы, соберите их так, чтобы они не мешали. Необходимо, чтобы на шее ничего не было: одежда не должна закрывать шею, шейные украшения нужно снять.
2. Промокните шею и металлические пластины влажным полотенцем.
3. Наденьте массажер так, чтобы он плотно прилегал к шее, а динамик был направлен вверх.

Примечание. Если включить массажер, но дотронуться только до одного электрода, то электрические импульсы не будут подаваться.

4. Займите удобное положение, шея не должна быть напряжена. Чтобы включить массажер, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». Массажер включится и подаст звуковую команду: «Массажер включен».



Увлажните кожу шеи перед использованием». По умолчанию включен первый комбинированный режим, интенсивность воздействия 0 (электрические импульсы не включены).

5. Нажмите на кнопку «+», чтобы включить электрические импульсы, увеличив интенсивность воздействия до 1.
6. Для переключения режимов нажимайте на кнопку «Режим». Голосовые команды сообщают, какой режим включен.
7. При отсутствии каких-либо ощущений или слишком слабых ощущениях увеличьте интенсивность воздействия, нажав на кнопку «+». Если во время массажа вы хотите изменить интенсивность, нажмите на кнопку «+» для увеличения интенсивности или на кнопку «-» для уменьшения интенсивности. Голосовые команды сообщают, какая интенсивность выбрана. Если установлена интенсивность 1, при нажатии кнопки «-» подача электрических импульсов отключится, прозвучит голосовая команда: «Интенсивность 0».

Внимание! Не касайтесь руками двух металлических пластин одновременно, когда массажер включен!

8. Чтобы включить нагрев и настроить его уровень, нажимайте на кнопку «Вкл/Выкл». Индикатор нагрева загорится. Голосовые команды сообщают, какой уровень нагрева выбран. Также во время массажа вы можете отключить нагрев, для этого нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» несколько раз, чтобы прозвучала команда: «Нагрев отключен». Индикатор нагрева погаснет.

Примечание. Вы можете включить нагрев без электрических импульсов, для этого нажимайте на кнопку «-» один или более раз, чтобы прозвучала команда «Интенсивность 0», а затем нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», чтобы включить нагрев. Чтобы включить нагрев без массажа сразу после включения массажера, просто нажмите на кнопку «Вкл/Выкл».

9. Рекомендуемая длительность сеанса массажа — 15 минут. По истечении 15 минут массажер подает голосовую команду «Массаж окончен» и автоматически отключается, даже если вы меняли режим, интенсивность воздействия или уровень нагрева. Если вы хотите отключить массажер раньше, нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл» в течение 2 секунд.



Примечание. Перед повторным включением массажера подождите 20–30 минут, чтобы избежать перегрева устройства. Не рекомендуется проводить более одного сеанса массажа подряд или более двух сеансов в день.

10. Снимите массажер с шеи. Протрите металлические пластины и массажер мягкой тканью.

Использование электродных накладок

Проверьте, чтобы поверхность электродных накладок была чистой. Если поверхность загрязнилась, пожалуйста, протрите ее мягкой влажной, а затем сухой тканью. Приложите электродные накладки к коже.

Вставьте шнур Micro-USB для электродных накладок в разъем для шнура на массажере и соедините с электродными накладками с другой стороны. Массаж возможен только при подключении двух накладок.

Управление массажем с использованием накладок осуществляется с помощью массажера, однако нагрев при использовании электродных накладок не включается.

Накладки можно использовать около 80 раз (по 15 минут каждый раз), затем их следует заменить на новые. Размер электродных накладок: 55 × 50 мм.

Примечание. Электродные накладки можно использовать на разных частях тела, например, на плечах, предплечьях, голених, бедрах, спине и т.д.

Внимание! Запрещено использовать электродные накладки в зоне сердца, лимфоузлов, на лице и в интимных зонах.

Советы

Рекомендуется увлажнить металлические пластины и кожу шеи водой или использовать токопроводящий контактный гель (в комплект не входит). Это обеспечит лучшую проводимость электрических импульсов.

Чувствительность к электрическим импульсам может различаться: для кого-то третья интенсивность кажется достаточной, а другие начинают ощущать воздействие только на десятой интенсивности. Рекомендуется начинать массаж на минимальной интенсивности и увеличивать ее, ориентируясь на свои ощущения. На высокой интенсивности воздействия возможно покраснение кожи в местах соприкосновения с металлическими пластинами.



Всегда проверяйте, чтобы металлические пластины/электродные накладки плотно прилегали к коже, при неплотном прилегании возможно ощущение жжения, покалывания и покраснение кожи. В таком случае прекратите массаж, перед новым сеансом массажа дождитесь, чтобы следы на коже прошли.

Если вы чувствуете дискомфорт на любой интенсивности воздействия, немедленно прекратите массаж и обратитесь к врачу.

Длительность сеанса массажа не должна превышать 15 минут. По истечении 15 минут массажер автоматически отключается, даже если вы меняли режим, интенсивность воздействия или уровень нагрева. Не проводите более одного сеанса массажа подряд и более двух сеансов в день.

Если вы хотите включить массажер еще раз, например, для проведения сеанса массажа другому человеку, то подождите 20–30 минут, чтобы избежать перегрева устройства.

Перед проведением массажа другому человеку очищайте металлические пластины и корпус массажера. Для очистки вы можете использовать ватный диск или мягкую ткань, смоченные хлоргексидином, или влажные салфетки.

Меры предосторожности по применению

1. Перед применением желательно проконсультироваться с врачом.
2. Прибор не является медицинским средством и используется только в профилактических целях.
3. Существует ряд противопоказаний к применению:
 - инфекционные заболевания кожи;
 - остеопороз;
 - наличие электронных устройств, например, кардиостимулятора;
 - злокачественные новообразования;
 - повышенная температура;
 - повреждения целостности кожного покрова в зоне массажа;
 - переломы, вывихи, разрывы мышц и прочие повреждения;
 - сахарный диабет;
 - беременность;
 - менструация;
 - заболевания сердца;
 - наличие ран или каких-либо заболеваний в острой форме;

- нечувствительность к теплу;
- переутомление;
- возраст младше 16 лет.

Чистка и обслуживание

Протирайте массажер сухой или влажной мягкой тканью после каждого использования и перед использованием, если это необходимо. Для чистки металлических пластин и электродных накладок допускается использовать влажные салфетки, мягкую ткань, губку или ватный диск, смоченные хлоргексидином. Не используйте агрессивные химические средства. Не мойте массажер. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса, на металлические пластины, в область органов управления, на разъем шнура Micro-USB, шнур Micro-USB и шнур Micro-USB для электродных накладок.



Уход и хранение

Перед тем как убрать массажер на хранение, очистите его и уберите в коробку или пакет, чтобы защитить от пыли. Храните массажер в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Не храните устройство под прямыми солнечными лучами или в месте с высокой температурой.

Храните устройство при температуре от 5 до 40 °С. Если массажер не используется в течение длительного времени, заряжайте его каждые 3–6 месяцев, чтобы предотвратить снижение емкости аккумулятора. Рекомендуется хранить устройство наполовину заряженным. Для этого сначала полностью разрядите массажер, затем заряжайте в течение 1 часа.



Устранение неполадок

Устройство не включается

Возможная причина	Решение
Аккумулятор разряжен	Зарядите массажер в соответствии с разделом «Зарядка массажера»
Аккумулятор исчерпал свой ресурс	Обратитесь в сервисный центр для замены аккумулятора

Массажер не работает, звуковые команды подаются

Возможная причина	Решение
Массаж отключен	Чтобы массажер начал работать, необходимо нажать на кнопку «+», чтобы установить интенсивность воздействия электрических импульсов 1
Металлические пластины неплотно прилегают к коже	Перед выполнением массажа убедитесь в отсутствии чего-либо на шее, наденьте одежду без воротника или «высокого горла», уберите волосы и снимите шейные украшения
Низкая интенсивность	Разная чувствительность кожи — индивидуальная особенность; если на низком уровне интенсивности вы ничего не ощущаете, установите более высокую интенсивность с помощью кнопки «+»
Металлические пластины загрязнились	Очистите поверхность металлических пластин, как описано в главе «Чистка и обслуживание», а затем попробуйте снова

Устройство работает, но голосовые команды не подаются

Возможная причина	Решение
Вы отключили голосовые команды	Чтобы включить голосовые команды, нажмите на кнопку «Режим» и удерживайте ее в течение 2–3 секунд

Электродные накладки не работают

Возможная причина	Решение
Массажер отключен	Управление массажем с использованием электродных накладок осуществляется с помощью массажера. Чтобы включить массажер, нажмите кнопку «Вкл/Выкл»
Вы не вставили шнур Micro-USB для электродных накладок	Вставьте шнур Micro-USB для электродных накладок в разъем для шнура Micro-USB на массажере и подключите к электродным накладкам
Массаж отключен	Чтобы массаж начался, необходимо нажать на кнопку «+», чтобы установить интенсивность воздействия электрических импульсов 1
Вы включили нагрев	При использовании электродных накладок нагрев не включается

Массажер не заряжается

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Ноутбук или компьютер не включены	Для зарядки массажера от USB-порта компьютера или ноутбука их необходимо включить
Пауэрбанк разряжен или не включен	Зарядите и включите пауэрбанк



Возможная причина	Решение
Поврежден шнур Micro-USB	Используйте другой шнур Micro-USB, рассчитанный на ток 1 А

Покраснение на коже

Возможная причина	Решение
Слишком высокая интенсивность воздействия или длительность массажа	Это не является неисправностью массажера. Чувствительная кожа может покраснеть или получить легкий ожог в месте прилегания электродов, если установлена высокая интенсивность или массаж длится слишком долго. Дождитесь, когда покраснение пройдет, в будущем используйте массажер на более низкой интенсивности и не превышайте рекомендуемое время массажа
Металлические пластины/электродные накладки неплотно прилегают к коже или кожа шеи не увлажнена	Перед включением массажера убедитесь, что металлические пластины/электродные накладки плотно прилегают к коже шеи, и кожа шеи увлажнена

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Питание: Micro-USB ~5 В, 1 А
2. Мощность: 5 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: III
4. Аккумулятор: Li-Ion 3,7 В, 1,1 А*ч (4,07 Вт*ч)
5. Тип массажера: электроимпульсный
6. Время зарядки: 2 ч
7. Время работы: 2 ч
8. Размер электродной накладки: 55 × 50 мм
9. Размер металлических пластин: 42 × 29 мм
10. Длина шнура Micro-USB: 0,5 м
11. Размер устройства: 160 × 173 × 40 мм
12. Размер упаковки: 214 × 177 × 52 мм
13. Вес нетто: 0,16 кг
14. Вес брутто: 0,35 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Шэньчжэнь Панго Мэдикал Электроникс Ко., Лтд.
№25 1 Индастри Зоун, Фэнхуан Роуд, Сикэн Вилидж, Хэнган Таун,
Лунган Дистрикт, Шэньчжэнь 518115, Гуандун, Китай.

Импортёр: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул.
Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.



Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя массажера для шеи вследствие попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса, на металлические пластины, в область органов управления, на разъем шнура Micro-USB, шнур Micro-USB и шнур Micro-USB для электродных накладок не является гарантийным случаем.

Повреждение корпуса устройства и металлических пластин вследствие чистки агрессивными моющими средствами не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.

4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур Micro-USB или шнур для электродных накладок. Не тяните за шнур Micro-USB при отключении от источника питания.
6. Не используйте устройство, если шнур Micro-USB или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не касайтесь металлических пластин и электродных накладок руками, когда массажер включен. Следите, чтобы дети не могли случайно дотронуться до металлических пластин или электродных накладок, когда массажер включен.
10. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
11. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
12. Храните устройство в недоступных детям местах.
13. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
14. При полной или частичной потере чувствительности не рекомендуется пользоваться прибором.
15. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса, на металлические пластины, в область органов управления, на разъем шнура Micro-USB, шнур Micro-USB и шнур Micro-USB для электродных накладок.



16. При повреждении шнура Micro-USB его следует заменить специальным шнуром Micro-USB или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
17. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
18. Обеспечьте необходимую вентиляцию при зарядке вокруг устройства.
19. Запрещено пользоваться прибором во время сна.
20. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 45 °C.
21. После зарядки отсоедините шнур Micro-USB сначала от источника питания, затем от устройства.
22. Запрещено использовать электродные накладки в зоне сердца, лимфоузлов, на лице и в интимных зонах.

IM-1



Другие товары Kitfort



Аэрогриль КТ-2235

- 5 автоматических программ + ручные настройки
- емкость корзины — 2,6 л
- мощность 1300 Вт

Вертикальный пылесос КТ-5105

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника — 900 мл
- мощность 600 Вт



Настольные часы КТ-3309

- беспроводная зарядка Qi
- 3 режима подсветки
- встроенный будильник

Вакууматор КТ-1526

- автоматическая упаковка
- вакуумирует сухие и влажные продукты
- режим вакуумирования в контейнеры





Инфракрасная плита КТ-139

- инфракрасный нагрев
- 5 автоматических программ + ручные настройки
- мощность 2000 Вт

Ручной отпариватель КТ-9108

- 2 в 1: отпаривание и сухая глажка
- ворсовая и тканевая насадки в комплекте
- складная конструкция
- мощность 1500 Вт



Сушилка для овощей и фруктов КТ-1919

- температура сушки 35–70°C с шагом 1°C
- регулировка высоты поддонов
- 5 вместительных поддонов в комплекте
- таймер до 24 часов

Настольная лампа КТ-3326

- 3 уровня яркости
- встроенная RGB-подсветка
- удобная регулировка наклона







ВСЕГДА ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте
в деле вместе с Kitfort!

8-800-775-56-87
info@kitfort.ru

