




Kitfort

УДОВОЛЬСТВИЕ В ЗАБОТЕ!

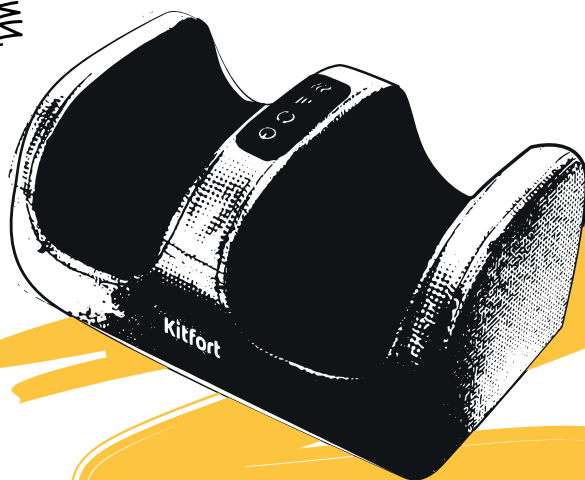

Penguin Pack
Массажер для ног
КТ-2994

kitfort.ru

RUS



KZ





Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Егер біздің жабдықты пайдалануда сізде қиындықтар туындаса, дүкенге хабарласпас бұрын Kitfort жедел желісіне қоңырау шалуды сұраймыз:

8-800-775-56-87

(дс-жм Мәскеу уақыты бойынша 9:30-дан 17:30-ға дейін)

info@kitfort.ru

Біз құрылғының ерекшеліктері туралы айтып береміз және кез-келген басқа мәселелер бойынша кеңес береміз

Содержание / версия на русском языке **RUS**

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство массажера для ног.....	5
Подготовка к работе и использование.....	6
Чистка и обслуживание	8
Уход и хранение.....	8
Устранение неполадок	8
Технические характеристики	9
Меры предосторожности.....	10
Мобильное приложение Kitfort.....	12

Мазмұны / қазақ тіліндегі нұсқасы **KZ**

Жалпы мәліметтер.....	14
Жинақтау	14
Аяқ массажер құрылғысы.....	15
Жұмысқа дайындық және пайдалану.....	16
Тазалау және техникалық қызмет көрсету.....	18
Күтім және сақтау	18
Ақаулықтарды жою	18
Техникалық сипаттамалары	19
Сақтық шаралары.....	20
Kitfort қосымшасы.....	22



Общие сведения

Массажер для ног КТ-2994 поможет снять усталость, уменьшить отеки и ослабить мышцы стоп и икр с помощью роликового массажа. Благодаря нагреву эффективность массажа повышается и достигается лучшее расслабление мышц. Интенсивность массажа настраивается: вы можете выбрать минимальную, среднюю или максимальную интенсивность. Также можно менять направление движения роликов массажера.

Такое разнообразие настроек поможет вам подобрать наиболее комфортный и приятный массаж.

Предустановленная длительность массажа — 15 минут. По прошествии этого времени массажер автоматически отключится.

В стопах человека находится множество рефлексогенных зон, фасций и мышц. С помощью данного массажера вы можете провести массаж не только стоп, но и икроножных мышц. Прорабатывая стопы и икры при помощи массажа, можно не только получить приятные ощущения, но и улучшить состояние здоровья в целом. Массаж ног улучшает обменные процессы и процессы регенерации, снимает напряжение, активизирует кровообращение, снимает гипертонус мышц, помогает в борьбе с отечностью.

Стильный дизайн массажера отлично впишется в любой интерьер.


Следует помнить, что при наличии противопоказаний или заболеваний необходимо проконсультироваться с лечащим врачом. Массажер для ног КТ-2994 не является медицинским прибором и используется только в профилактических целях. Также массажер можно использовать только при отсутствии каких-либо повреждений кожи, например ран, царапин или аллергических высыпаний.

Комплектация


1. Массажер для ног — 1 шт.
2. Блок питания — 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
4. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство массажера для ног

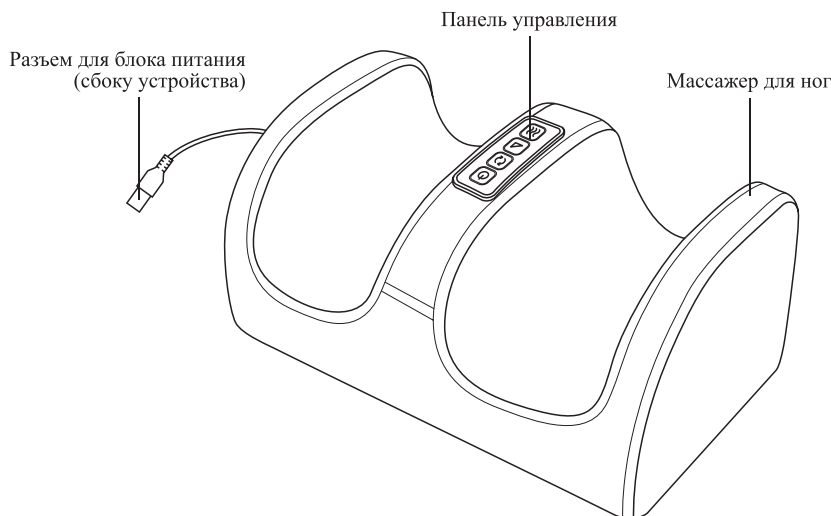

Панель управления

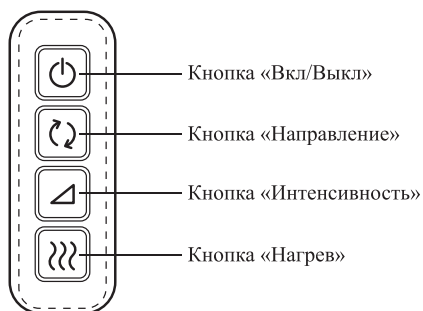

Кнопка «Вкл/Выкл» включает и выключает массажер. После включения устройство начнет работу со средней интенсивностью массажа, функция нагрева будет включена. По истечении 15 минут массажер автоматически выключится. Вы можете остановить его работу раньше, нажав на кнопку «Вкл/Выкл».

Кнопка «Направление» циклически переключает направление движения массажных роликов. Направление вращения роликов меняется автоматически каждую минуту.

Кнопка «Интенсивность» циклически переключает интенсивность массажа. У массажера есть 3 интенсивности массажа: минимальная, средняя и максимальная. После включения массажер начинает работу на средней интенсивности. Чем больше интенсивность, тем быстрее крутятся массажные ролики.

Кнопка «Нагрев» включает и отключает нагрев.



Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте массажер и удалите все упаковочные материалы. Протрите корпус влажной, а затем сухой мягкой тканью. Подключите шнур блока питания к устройству, затем подключите блок питания к сети.

Использование

1. Займите удобное положение сидя или лежа. Затем расположите стопы или икры ног на массажере. Массажер для ног нельзя стирать, поэтому чтобы сохранить устройство в чистоте, проводите сеанс массажа в чистых тонких, эластичных брюках и носках. На одежде не должно быть никаких выпуклых декоративных элементов, молний, пуговиц и прочего.
2. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». Устройство начнет выполнять массаж при средней интенсивности, нагрев будет включен.
3. Для настройки интенсивности массажа нажимайте на кнопку «Интенсивность».
4. При желании вы можете выключить нагрев ног. Для этого нажмите на кнопку «Нагрев». Чтобы включить нагрев, снова нажмите на кнопку «Нагрев».
5. Чтобы изменить направление вращения роликов, нажимайте на кнопку «Направление». Направление вращения роликов меняется автоматически каждую минуту.

Продолжительность массажа составляет 15 минут. По прошествии установленного времени массажер автоматически отключится. Чтобы отключить массажер раньше, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл».

Примечания. Не используйте массажер более 15 минут подряд. Это может привести к перегреву массажера и сокращению срока службы. Перед повторным включением должно пройти не менее 30 минут.

Сеанс массажа для одного человека рассчитан на 15 минут. Увеличение времени сеанса массажа может привести к чрезмерной стимуляции мышц, что может неблагоприятно отразиться на самочувствии человека.

6. Отключите устройство от сети питания.



Меры предосторожности по применению

1. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
2. Прибор не является медицинским оборудованием и используется только в профилактических целях.
3. Существует ряд противопоказаний к применению:
 - беременность;
 - тромбофлебит, варикоз;
 - нарушение целостности кожных покровов в месте воздействия (раны, порезы, ожоги и другие);
 - нарушение свертываемости крови, прием лекарственных препаратов, влияющих на скорость свертывания;
 - обострение хронических заболеваний;
 - онкология;
 - травмы, переломы;
 - остеопороз;
 - наличие электронных устройств, например, кардиостимулятора при заболевании сердца;
 - недавняя операция или ввод инъекций;
 - гипертония;
 - грипп, ОРВИ, повышенная температура;
 - почечная недостаточность;
 - сахарный диабет;
 - гипогликемия;
 - слабость, нервозность;
 - переутомление;
 - возраст младше 16 лет.
4. Если во время массажа вы ощущаете дискомфорт или боль, прекратите массаж. Если дискомфорт или боль не проходят длительное время, проконсультируйтесь с врачом.

Советы

Не используйте массажер более 15 минут. Массаж должен быть умеренно сильным и приятным. Если вы почувствовали боль или дискомфорт, сразу же прекратите процедуру и проконсультируйтесь с врачом.

Если вы только начали пользоваться массажером, то не рекомендуются частые повторения сеансов. В противном случае на следующий день на ногах могут появиться синяки и начаться боль в мышцах. Увеличивайте количество сеансов постепенно.



Чистка и обслуживание

Перед чисткой и обслуживанием всегда выключайте массажер и отключайте его от сети питания. Протирайте корпус влажной, а затем сухой мягкой тканью. Допускается использовать небольшое количество мягкого моющего средства для удаления пятен. Не используйте агрессивные моющие средства. Не сушите массажер на солнце. Не используйте массажер, если он влажный.

Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь устройства, на панель управления, разъем для подключения блока питания и на блок питания.



Уход и хранение

Храните массажер в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. На длительное хранение уберите массажер и блок питания в пакет или коробку для защиты от пыли.

Устранение неполадок

Устройство не включается

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Массажер подключен к сети, но не нажата кнопка «Вкл/Выкл»	Чтобы включить массажер, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл»
Шнур блока питания не плотно вставлен в разъем для блока питания на массажере или в розетку	Плотно вставьте штекер блока питания в разъем для блока питания на массажере, затем подключите блок питания к сети
Вы включали массажер более 15 минут подряд, массажер перегрелся	Подождите не менее 30 минут, попробуйте включить массажер снова

Неприятные ощущения во время массажа

Возможная причина	Решение
Установлена высокая интенсивность массажа	Установите низкую или среднюю интенсивность массажа

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Блок питания:
 - вход: ~100–240 В, 50/60 Гц, 0,7 А
 - выход: $\approx$ 12 В, 2 А
2. Мощность: 24 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током:
 - блока питания: II
 - массажера: III
4. Количество уровней интенсивности: 3
5. Тип массажера: роликовый
6. Автоотключение: через 15 мин
7. Длина шнура блока питания: 1,8 м
8. Размер устройства: 330 × 180 × 140 мм
9. Размер упаковки: 365 × 188 × 160 мм
10. Вес нетто: 1,2 кг
11. Вес брутто: 1,6 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Сямэнь Хэлспал Электроник Ко., Лтд. Юнит 1402, Блок Б, Тяньху Билдинг, №148, Биньлан Сили, Сымин Дистрикт, Сямэнь, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.



Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя массажера вследствие попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь устройства, на панель управления, разъем для подключения блока питания и на блок питания не является гарантийным случаем.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного износа массажера или несоответствующего использования.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте массажер только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите массажер, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части массажера повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться массажером только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с массажером.
8. Контролируйте работу массажера, когда рядом находятся дети или домашние животные.

9. Не используйте устройство, если ваши руки или ноги мокрые, прежде следует вытереть мокрые части тела.
10. Не включайте массажер более 15 минут подряд без перерыва. Это может привести к повреждению устройства.
11. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
12. Устанавливайте массажер только на устойчивую горизонтальную поверхность вдали от нагревательных элементов на расстоянии не менее 10 см от стены и других предметов. Устанавливайте прибор так, чтобы ничто не мешало доступу воздуха в отверстия, расположенные на дне устройства. Не накрывайте прибор. Не устанавливайте прибор на ковровые покрытия с длинным ворсом.
13. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
14. Не допускайте падения массажера и не подвергайте его ударам.
15. Храните устройство в недоступных детям местах.
16. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
17. При повреждении блока питания его следует заменить специальным блоком питания или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
18. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь устройства, на панель управления, разъем для подключения блока питания и на блок питания.
19. Перед использованием обязательно ознакомьтесь с разделом «Меры предосторожности по применению». В ряде случаев, в том числе при беременности, прибором пользоваться запрещено.
20. Массажер предназначен только для массажа ног. Не используйте устройство для проведения массажа других частей тела.
21. Не превышайте максимальное время работы устройства (15 минут). По истечении этого времени сделайте перерыв на 30 минут во избежание перегрева устройства.





RUS

ПРИЛОЖЕНИЕ KITFORT

- Удобный каталог
- Интересный контент
- Отзывы и обзоры реальных покупателей
- Техническая поддержка



App Store



Google Play


Скачивайте приложение Kitfort





Kitfort

Қуанышпен
қапқорлық!

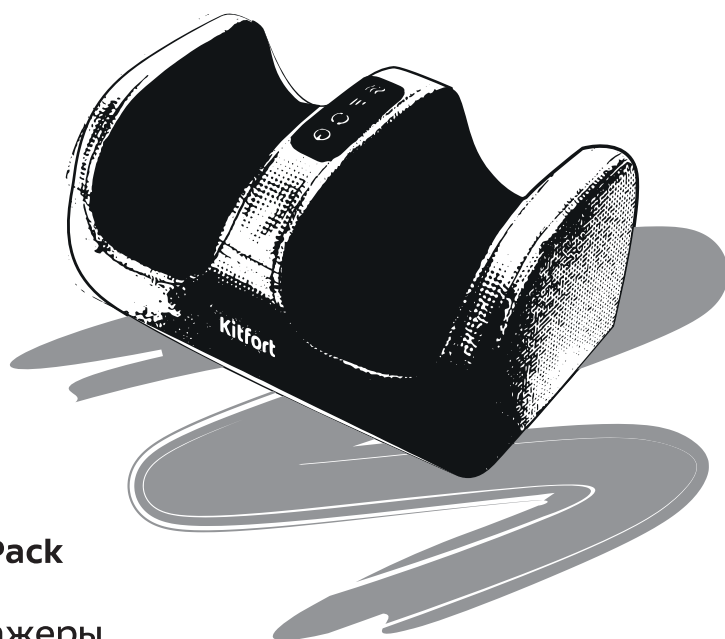

Penguin Pack
КТ-2994
аяқ массажеры

kitfort.ru

KZ



Жалпы мәліметтер

КТ-2994 аяқ массажеры шаршауды жеңілдетуге, ісінуді азайтуға және роликті массаж арқылы аяқ пен бұзау бұлшықеттерін босаңсытуға көмектеседі. Жылудың арқасында массаждың тиімділігі артып, бұлшықеттердің жақсы релаксациясына қол жеткізіледі. Массаждың қарқындылығы реттеледі: сіз минималды, орташа немесе максималды қарқындылықты таңдай аласыз. Сондай-ақ, массажер роликтерінің қозғалыс бағытын өзгертуге болады.

Параметрлердің бұл әртүрлілігі сізге ең ыңғайлы және жағымды массажды таңдауға көмектеседі.

Массаждың алдын ала белгіленген ұзақтығы — 15 минут. Осы уақыттан кейін массажер автоматты түрде өшеді.

Адамның аяғында көптеген рефлексогендік аймақтар, фасциялар мен бұлшықеттер бар. Бұл массажердің көмегімен сіз тек аяққа ғана емес, балтыр бұлшықеттеріне де массаж жасай аласыз. Массаж көмегімен аяқтар мен балтырларды жұмыс жасай отырып, сіз жағымды сезімдерді ғана емес, сонымен қатар жалпы денсаулықты жақсартып аласыз. Аяқ массажы метаболизм процестері мен регенерация процестерін жақсартады, кернеуді жеңілдетеді, қан айналымын белсендіреді, бұлшықет гипертониясын жеңілдетеді және ісінуден күресуге көмектеседі.

Массажердің стильді дизайны кез-келген интерьерге өте жақсы сәйкес келеді.


Егер қарсы көрсетілімдер немесе аурулар болса, емдеуші дәрігермен кеңесу керек екенін есте ұстаған жөн. КТ-2994 аяқ массажеры медициналық құрал емес және тек профилактикалық мақсатта қолданылады. Сондай-ақ, массажерді жаралар, сызаттар немесе аллергиялық бөртпелер сияқты терінің зақымдануы болмаған жағдайда ғана қолдануға болады.

Жинақтау


1. Аяқ массажеры — 1 дана
2. Қуат көзі — 1 дана
3. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық — 1 дана
4. Коллекциялық магнит — 1 дана*

*қосымша

Аяқ массажер құрылғысы

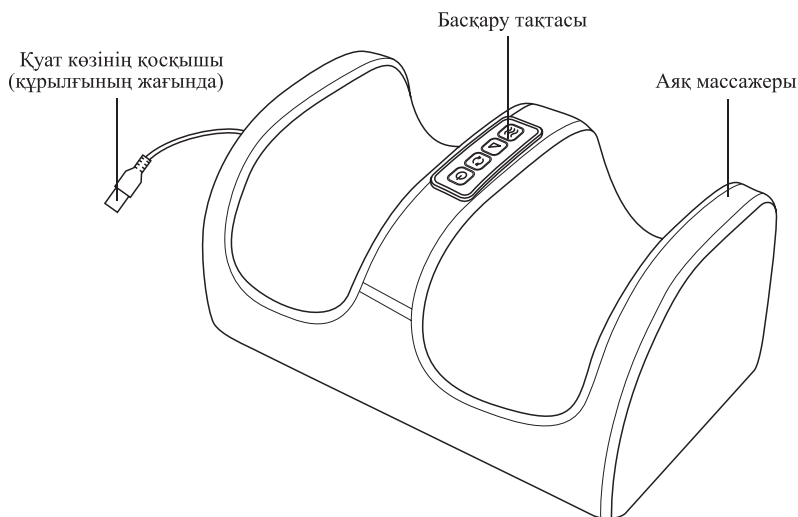

Басқару тақтасы

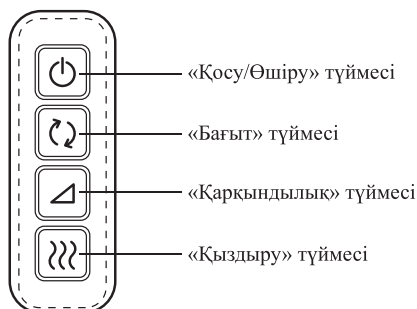

«Қосу/Өшіру» түймесі массажерді қосады және өшіреді. Қосылғаннан кейін құрылғы массаждың орташа қарқындылығымен жұмыс істей бастайды, қыздыру функциясы қосылады. 15 минуттан кейін массажер автоматты түрде өшеді. «Қосу/Өшіру» түймесін басу арқылы оның жұмысын ертерек тоқтатуға болады.

«Бағыт» түймесі массаж роликтерінің қозғалыс бағытын айналдырады. Роликтердің айналу бағыты минут сайын автоматты түрде өзгереді.

«Қарқындылық» түймесі массаждың қарқындылығын айналдырады. Массажердің массаждың 3 қарқындылығы бар: минималды, орташа және максималды. Қосылғаннан кейін массажер орташа қарқындылықта жұмыс істей бастайды. Қарқындылық неғұрлым көп болса, массаж роликтері соғұрлым тез айналады.

«Қыздыру» түймесі жылуды қосады және өшіреді.



Жұмысқа дайындық және пайдалану

Жұмысқа дайындық

Массажерді алыңыз және барлық орау материалдарын алыңыз. Корпусты дымқыл, содан кейін құрғақ, жұмсақ шүберекпен сүртіңіз. Қуат сымын құрылғыға қосыңыз, содан кейін қуат көзін желіге қосыңыз.

Пайдалану

1. Ыңғайлы отыру немесе жату позициясын алыңыз. Содан кейін аяқтарыңызды немесе балтырларыңызды массажерге қойыңыз. Аяқ массажеры жууға болмайды, сондықтан құрылғыны таза ұстау үшін массаж сеансын таза, жұқа, серпімді шалбар мен шұлықта өткізіңіз. Киімде дөңес сәндік элементтер, найзағай, түймелер және басқа заттар болмауы керек.
2. «Қосу/Өшіру» түймесін басыңыз. Құрылғы орташа қарқындылықта массаж жасай бастайды, жылу қосылады.
3. Массаждың қарқындылығын реттеу үшін «Қарқындылық» түймесін басыңыз.
4. Қаласаңыз, аяқтың қызуын өшіруге болады. Ол үшін «Қыздыру» түймесін басыңыз. Жылуды қосу үшін «Жылыту» түймесін қайтадан басыңыз.
5. Роликтердің айналу бағытын өзгерту үшін «Бағыт» түймесін басыңыз. Роликтердің айналу бағыты минут сайын автоматты түрде өзгереді. Массаждың ұзақтығы — 15 минут. Белгіленген уақыттан кейін массажер автоматты түрде өшеді. Массажерді ертерек өшіру үшін «Қосу/Өшіру» түймесін басыңыз.

Ескертулер. Массажерді қатарынан 15 минуттан артық пайдаланбаңыз. Бұл массажердің қызып кетуіне және қызмет ету мерзімінің қысқаруына әкелуі мүмкін. Қайта қосар алдында кем дегенде 30 минут кетуі керек.

Бір адамға арналған массаж сеансы 15 минутқа созылады. Массаж сеансының уақытын ұзарту бұлшықеттердің шамадан тыс ынталандырылуына әкелуі мүмкін, бұл адамның әл-ауқатына теріс әсер етуі мүмкін.

6. Құрылғыны қуат көзінен ажыратыңыз.

Қолдану бойынша сақтық шаралары

1. Қолданар алдында дәрігермен кеңесу ұсынылады.
2. Құрылғы медициналық жабдық емес және тек профилактикалық мақсатта қолданылады.
3. Қолдануға бірқатар қарсы көрсеткіштер бар:
 - жүктілік;
 - тромбофлебит, варикозды тамырлар;
 - әсер ету орнында терінің тұтастығын бұзу (жаралар, кесектер, күйіктер және басқалар);
 - қан ұюының бұзылуы, ұю жылдамдығына әсер ететін дәрілік препараттарды қабылдау;
 - созылмалы аурулардың өршуі;
 - онкология;
 - жарақаттар, сынықтар;
 - остеопороз;
 - жүрек ауруы кезінде кардиостимулятор сияқты электронды құрылғылардың болуы;
 - соңғы операция немесе инъекция;
 - гипертония;
 - тұмау, ЖРВИ, жоғары температура;
 - бүйрек жеткіліксіздігі;
 - қант диабеті;
 - гипогликемия;
 - әлсіздік, жүйке;
 - шамадан тыс жұмыс;
 - 16 жасқа толмаған.
4. Егер сіз массаж кезінде ыңғайсыздық немесе ауырсыну сезінсеңіз, массажды тоқтатыңыз. Егер ыңғайсыздық немесе ауырсыну ұзақ уақытқа созылмаса, дәрігермен кеңесіңіз.

Кеңестер

Массажерді 15 минуттан артық пайдаланбаңыз. Массаж орташа күшті және жағымды болуы керек. Егер сіз ауырсынуды немесе ыңғайсыздықты сезінсеңіз, процедураны дереу тоқтатып, дәрігермен кеңесіңіз.

Егер сіз массажерді енді ғана қолдана бастаған болсаңыз, онда сеанстарды жиі қайталау ұсынылмайды. Әйтпесе, келесі күні аяқтар көгеріп, бұлшықет ауыруы басталуы мүмкін. Сеанстар санын біртіндеп көбейтіңіз.



Тазалау және техникалық қызмет көрсету

Тазалау және техникалық қызмет көрсету алдында әрқашан массажерді өшіріп, оны қуат көзінен ажыратыңыз. Корпусты дымқыл, содан кейін құрғақ, жұмсақ шүберекпен сүртіңіз. Дақтарды кетіру үшін аз мөлшерде жұмсақ жуғыш затты қолдануға рұқсат етіледі. Қатты жуғыш заттарды қолданбаңыз. Массажды күн астында кептірмеңіз. Массажер дымқыл болса, оны қолданбаңыз.

Сұйықтықтарды, ұнтақтарды және бөгде заттарды құрылғының ішіне, басқару панеліне, қуат көзін қосуға арналған қосқышқа және қуат көзіне кіргізбеңіз.

Күтім және сақтау

Массажерді балалардың қолы жетпейтін құрғақ және салқын жерде сақтаңыз. Ұзақ мерзімді сақтау үшін массажер мен қуат көзін шаңнан қорғау үшін сөмкеге немесе қорапқа салыңыз.

Ақаулықтарды жою

Құрылғы қосылмайды

Мүмкін себеп	Шешім
Желіде кернеу жоқ	Желідегі кернеуді тексеріңіз
Массажер желіге қосылған, бірақ «Қосу/Өшіру» түймесі басылмаған	Массажерді қосу үшін «Қосу/Өшіру» түймесін басыңыз
Қуат сымы массажердегі қуат көзінің қосқышына немесе розеткаға тығыз салынбаған	Қуат көзінің ашасын массажердегі қуат көзінің қосқышына мықтап салыңыз, содан кейін қуат көзін желіге қосыңыз
Сіз массажерді қатарынан 15 минуттан артық қостыңыз, массажер қызып кетті	Кем дегенде 30 минут күтіңіз, массажерді қайта қосып көріңіз

Массаж кезінде жағымсыз сезімдер

Мүмкін себеп	Шешім
Массаждың жоғары қарқындылығы орнатылды	Массаждың төмен немесе орташа қарқындылығын орнатыңыз

Егер сіздің жағдайыңыз жоғарыда көрсетілмесе, бізге электрондық пошта арқылы жіберіңіз info@kitfort.ru, сіздің мәселенізді шешетін фотосуреттерді немесе бейне файлдарды қосу арқылы. Сондай-ақ, құрылғының корпусының түбінде немесе артында орналасқан сериялық нөмірі бар жапсырманың суретін жіберіңіз.

Керек жарақтарды немесе аксессуарларды сатып алу туралы бізге жазыңыз osh@kitfort.ru.

Техникалық сипаттамалары

1. Қуат көзі:
 - кіріс: ~100–240 В, 50/60 Гц, 0,7 А
 - шығу: =12 В, 2 А
2. Қуаты: 24 Вт
3. Электр тогының соғуынан қорғау класы:
 - қуат көзі: II
 - массажер: III
4. Қарқындылық деңгейлерінің саны: 3
5. Массаж түрі: роликті
6. Автоматты өшіру: 15 минуттан кейін
7. Қуат көзінің сымының ұзындығы: 1,8 м
8. Құрылғының өлшемі: 330 × 180 × 140 мм
9. Қаптама мөлшері: 365 × 188 × 160 мм
10. Таза салмағы: 1,2 кг
11. Жалпы салмағы: 1,6 кг

Қызмет мерзімі: 2 жыл

Кепілдік мерзімі: 1 жыл

Өнім сертификатталған:



Өндіруші: Сямэнь Хэлспал Электроник Ко., Лтд. Юнит 1402, Блок Б, Тяньху Билдинг, №148, Биньлан Сили, Сымин Дистрикт, Сямэнь, Қытай.

Импорттаушы: «Аэро-Трейд» ЖШҚ. 197022, Санкт-Петербург к., Инструментальная к-сі, 3-үй, литер П, үй-жай. 3-Н.

Шыққан елі: Қытай.

Ресей Федерациясының аумағында шағымдарды қабылдауға уәкілетті ұйым: «Аэро-Трейд» ЖШҚ. 197022, Санкт-Петербург к., Инструментальная к-сі, 3-үй, литер П, үй-жай. 3-Н.

Өндірушінің сенім телефоны: 8-800-775-56-87 (Мәскеу уақыты бойынша дүйсенбі-жұма 9:30-дан 17:30-ға дейін), info@kitfort.ru

Қызмет көрсету орталықтарының мекен жайларын жедел желі операторынан немесе сайттан біле аласыз kitfort.ru



Арнайы кәдеге жарату қажет. Қоршаған ортаға зиян келтірмеу үшін бұл объектіні қарапайым қалдықтардан бөліп алып, оны ең қауіпсіз әдіспен кәдеге жарату керек, мысалы, оны кәдеге жарату үшін арнайы орындарға тапсыру керек.

Шығарылған айы мен жылы қаптама қорабының төменгі жағында көрсетілген.

Өндіруші осы өзгерістер туралы қосымша ескертусіз өз өнімін жетілдіру барысында бұйымның дизайнына, жинақталуына, сондай-ақ техникалық сипаттамаларына өзгерістер енгізуге құқылы.

Кепілдік шарттары

Корпустың, аксессуарлардың немесе құрылғының құрамдас бөліктерінің механикалық зақымдануы кепілдік жағдайы болып табылмайды.

Сұйықтықтардың, ұнтақтардың және бөгде заттардың құрылғының ішіне, басқару панеліне, қуат көзін қосуға арналған қосқышқа және қуат көзіне түсуіне байланысты массажердің істен шығуы кепілдік жағдайы болып табылмайды.

Кепілдік массажердің табиғи тозуынан немесе орынсыз пайдаланудан туындаған ақауларға қолданылмайды.

Сақтық шаралары

Пайдалану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Сақтық шараларына ерекше назар аударыңыз. Нұсқаулықты әрқашан қолыңызда ұстаңыз.

1. Құрылғы тұрмыстық пайдалануға арналған және оны пәтерлерде, саяжайларда, қонақүй бөлмелерінде, кеңселерде және басқа да осындай жерлерде өнеркәсіптік емес және коммерциялық емес пайдалану үшін қолдануға болады.
2. Массажды тек мақсаты бойынша және осы нұсқаулықта көрсетілген нұсқауларға сәйкес қолданыңыз. Құрылғыны мақсатсыз пайдалану дұрыс пайдалану шарттарын бұзу болып саналады.
3. Құрылғыны электр розеткасына қоспас бұрын, онда көрсетілген қуат параметрлері пайдаланылатын қуат көзінің параметрлеріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
4. Электр тогының соғуын болдырмау үшін құрылғыны суға және басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.
5. Қуат сымын алу арқылы массажерге жол бермеңіз. Штепсельді розеткадан ажыратқан кезде қуат сымын тартпаңыз.
6. Қуат сымы, штепсель немесе массажердің басқа бөліктері зақымдалған болса, құрылғыны пайдаланбаңыз. Электр тогының соғуын болдырмау үшін құрылғыны өзіңіз бөлшектемеңіз-оны жөндеу үшін білікті маманға хабарласыңыз. Есіңізде болсын, құрылғыны дұрыс жинамау жұмыс кезінде электр тогының соғу қаупін арттырады.

7. Балаларға, физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдарға, сондай-ақ жеткілікті білімі мен тәжірибесі жоқ адамдарға массажерді олардың қауіпсіздігіне жауапты адамдардың бақылауымен немесе құрылғыны пайдалану жөніндегі нұсқаулықтан кейін ғана пайдалануға рұқсат етіледі. Балаларға массаж жасаушымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
8. Жақын жерде балалар немесе үй жануарлары болған кезде массажердің жұмысын бақылаңыз.
9. Қолдарыңыз немесе аяқтарыңыз дымқыл болса, құрылғыны пайдаланбаңыз, алдымен дымқыл дене бөліктерін сүртіңіз.
10. Массажерді үзіліссіз қатарынан 15 минуттан артық қоспаңыз. Бұл құрылғыға зақым келтіруі мүмкін.
11. Жұмыс істеп тұрған құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз. Құрылғыны ұзақ уақыт пайдаланбасаңыз немесе техникалық қызмет көрсетуден бұрын оны өшіріп, ажыратыңыз.
12. Массажерді қабырғадан және басқа заттардан кемінде 10 см қашықтықта қыздыру элементтерінен алыс тұрақты көлденең бетке ғана орнатыңыз. Құрылғыны құрылғының түбінде орналасқан тесіктерге ауа кіруіне ештеңе кедергі болмайтындай етіп орнатыңыз. Құрылғыны жаппаңыз. Құрылғыны ұзын қадалы кілемге орнатпаңыз.
13. Құрылғыны қосу құлпын айналып өтуге тырыспаңыз.
14. Массажердің құлап кетуіне жол бермеңіз және оны сокқыларға ұшыратпаңыз.
15. Құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерлерде сақтаңыз.
16. Өндіруші ұсынған керек-жарақтарды немесе компоненттерді ғана пайдаланыңыз. Басқа қосымша керек-жарақтарды пайдалану құрылғының бұзылуына немесе жарақатқа әкелуі мүмкін.
17. Қуат көзі зақымдалған кезде оны арнайы қуат көзімен немесе өндірушіден немесе сервистік қызметтен алынған жиынтықпен ауыстыру керек.
18. Сұйықтықтарды, ұнтақтарды және бөгде заттарды құрылғының ішіне, басқару панеліне, қуат көзін қосуға арналған қосқышқа және қуат көзіне кіргізбеңіз.
19. Қолданар алдында «Қолдану сақтық шаралары» бөлімін тексеріңіз. Кейбір жағдайларда, соның ішінде жүктілік кезінде құрылғыны пайдалануға тыйым салынады.
20. Массаж тек аяққа массаж жасауға арналған. Дененің басқа бөліктеріне массаж жасау үшін құрылғыны пайдаланбаңыз.
21. Құрылғының максималды жұмыс уақытынан аспаңыз (15 минут). Осы уақыттан кейін құрылғының қызып кетуіне жол бермеу үшін 30 минут үзіліс жасаңыз.



KZ

KITFORT ҚОСЫМШАСЫ

- Ыңғайлы каталог
- Қызықты контент
- Нақты сатып алушылардың пікірлері
- Техникалық қолдау



App Store



Google Play

Kitfort косымшаны жүктеп алыңыз







Приятно познакомиться, Kitfort!

Kitfort — компания-производитель бытовой техники для дома, кухни, красоты и здоровья.

Наш главный девиз — «Всегда что-то новенькое!»

В каталоге бренда вы можете найти всё необходимое для комфортной жизни: от кофемашины до робота для мойки окон. Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, чтобы вы выбрали идеальный для себя вариант!

Kitfort не только предлагает качественные товары по лучшей цене, но и радует подарками, конкурсами и интересным контентом в социальных сетях.

Танысқаныма қуаныштымын, Kitfort!

Kitfort — үй, ас үй, сұлулық және денсаулыққа арналған тұрмыстық техниканы өндіруші компания.

Біздің басты ұранымыз «Әрқашан жаңа нәрсе!»

Бренд каталогында сіз жайлы өмір сүру үшін қажет нәрсенің бәрін таба аласыз: кофеқайнатқыштан бастап терезе жууға арналған роботқа дейін. Біз сіз үшін тамаша опцияны табу үшін ассортиментті үнемі жаңартып, кеңейтіп отырамыз!

Kitfort сапалы тауарларды ең жақсы бағамен ұсынып қана қоймайды, сонымен қатар сыйлықтармен, байқаулармен және әлеуметтік желілердегі қызықты мазмұнмен қуантады.



Подписывайтесь на наши соцсети
и становитесь частью вселенной Kitfort

Біздің әлеуметтік желілерге жазылыңыз
және Kitfort әлемінің бір бөлігі болыңыз

8 (800) 775–56–87
info@kitfort.ru

