


Время для себя!

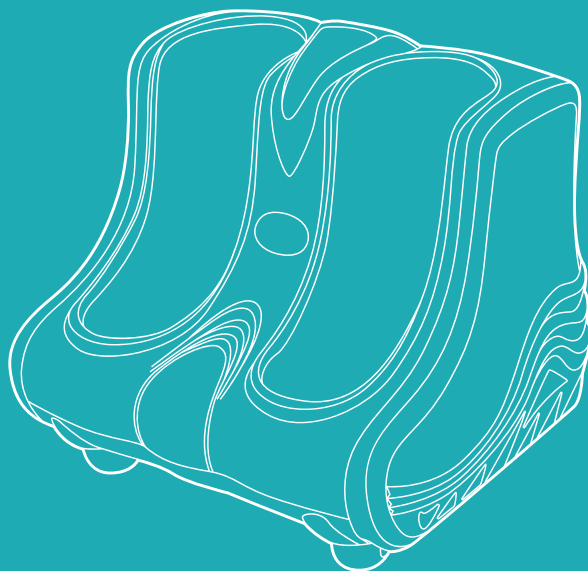

**Массажер для ног
КТ-5913**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство массажера для ног	5
Подготовка к работе и использование	6
Чистка и обслуживание	8
Уход и хранение.....	8
Устранение неполадок	9
Технические характеристики	9
Меры предосторожности	10

Общие сведения

Массажер для ног КТ-5913 выполнит массаж ваших ног и избавит их от усталости. Прибор сочетает в себе вибрационный, разминающий массаж, а также нагрев. Все функции можно использовать по отдельности или комбинируя друг с другом. Управление осуществляется с помощью кнопок на панели управления.

Разминающий массаж в сочетании с вибрационным позволяет эффективно ослабить мышцы.

Прибор массирует стопы и голени благодаря колебаниям различной интенсивности. У устройства есть 6 режимов массажа стоп и голеней, которые отличаются интенсивностью, а также 3 уровня нагрева. Такое разнообразие настроек поможет вам подобрать наиболее комфортный и приятный массаж.

В стопах человека находится множество рефлексогенных зон, фасций и мышц. Прорабатывая их при помощи массажа, можно не только получить приятные ощущения, но и улучшить состояние здоровья в целом. Массаж стоп обладает следующими положительными эффектами: улучшает обменные процессы и процессы регенерации, снимает напряжение, активизирует кровообращение, снимает гипертонус мышц, помогает в борьбе с отечностью. Однако следует помнить, что при наличии противопоказаний или заболеваний необходимо проконсультироваться с лечащим врачом. Массажер для ног КТ-5913 не является медицинским средством и используется только в профилактических целях.

После 15-минутного сеанса сработает таймер с автоотключением.


Прорезиненные ножки массажера не дают ему скользить по полу. Опора в нижней части корпуса позволит регулировать угол наклона массажера, а также переносить прибор.

Комплектация


1. Массажер с двумя съемными тканевыми чехлами — 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
3. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство массажера для ног

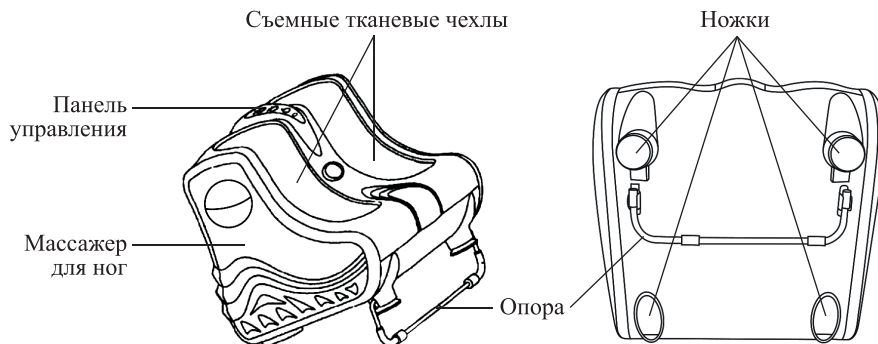

Панель управления

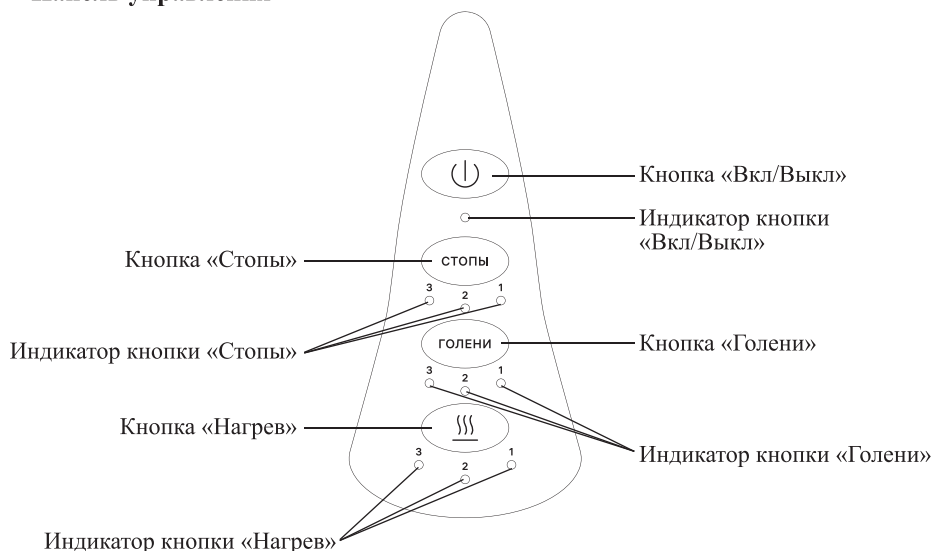

Нажатие на **кнопку «Вкл/Выкл»** включает и выключает массажер. По умолчанию массажер начнет работу на первом режиме, будет установлена минимальная интенсивность массажа для зон голени и стоп, при этом загорятся индикатор кнопки «Вкл/Выкл», индикатор «1» кнопки «Голени» и индикатор «1» кнопки «Стопы». У массажера есть автоматическое отключение через 15 минут работы.

Нажатие на **кнопку «Стопы»** циклически переключает режимы вибрационного и разминающего массажа для этой зоны ног:

- первое нажатие включает второй режим работы: будет установлена средняя интенсивность массажа, загорается индикатор «2»;



- второе нажатие включает третий режим работы: будет установлена максимальная интенсивность массажа, загорается индикатор «3»;
- третье нажатие на кнопку «Стопы» выключает массаж этой зоны, индикаторы кнопки «Стопы» погаснут.

Нажатие на **кнопку «Голени»** циклически переключает режимы разминающего массажа для этой зоны ног:

- первое нажатие включает второй режим работы: будет установлена средняя интенсивность массажа, загорается индикатор «2»;
- второе нажатие включает третий режим работы: будет установлена максимальная интенсивность массажа, загорается индикатор «3»;
- третье нажатие на кнопку «Голени» выключает массаж этой зоны, индикаторы кнопки «Голени» погаснут.

Нажатие на **кнопку «Нагрев»** циклически переключает уровни нагрева стоп. У массажера 3 уровня нагрева стоп, при этом загораются 3 разных индикатора:

- первое нажатие включает минимальный уровень нагрева, загорается индикатор «1»;
- второе нажатие включает средний уровень нагрева, загорается индикатор «2»;
- третье нажатие включает максимальный уровень нагрева, загорается индикатор «3»;
- четвертое нажатие выключает нагрев, индикаторы кнопки «Нагрев» погаснут.

Ниже приведена таблица температуры при включенном нагреве на разных режимах:

Режимы	Температура (°C)
1	25
2	31
3	36

Нажатия на кнопки сопровождаются звуковыми сигналами.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте массажер и удалите все упаковочные материалы. Снимите съемные тканевые чехлы, отстегнув молнию. Вы можете постирать тканевые чехлы вручную или в стиральной машине при температуре не выше 40°, высушить и вставить обратно в корпус массажера, зафиксировав их молнией. Протрите корпус влажной, затем сухой мягкой тканью.

Расположите массажер на полу. При необходимости отрегулируйте угол наклона массажера, выдвинув опору. Подключите прибор к сети.

Использование

1. Сядьте на диван или стул и займите удобное положение. Вставьте ноги в отверстия массажера.

Внимание! Делайте массаж только сидя. Не вставайте на массажер.

2. Для включения массажера нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». По умолчанию массажер начнет работу на первом режиме, будет установлена минимальная интенсивность массажа для зон голеней и стоп, при этом загорятся индикатор кнопки «Вкл/Выкл», индикатор «1» кнопки «Стопы» и индикатор «1» кнопки «Голени».
 3. Нажмите на кнопку «Стопы» один раз, если хотите установить второй режим работы, выбрав среднюю интенсивность массажа, при этом загорится индикатор «2». Нажмите на кнопку «Стопы» второй раз, если хотите установить третий режим работы, выбрав максимальную интенсивность массажа, при этом загорится индикатор «3». Нажмите на кнопку «Стопы» третий раз, чтобы выключить массаж этой зоны ног, индикаторы кнопки «Стопы» погаснут.
 4. Нажмите на кнопку «Голени» один раз, если хотите установить второй режим работы, выбрав среднюю интенсивность массажа, при этом загорится индикатор «2». Нажмите на кнопку «Голени» второй раз, если хотите установить третий режим работы, выбрав максимальную интенсивность массажа, при этом загорится индикатор «3». Нажмите на кнопку «Голени» третий раз, чтобы выключить массаж этой зоны ног, индикаторы кнопки «Голени» погаснут.
 5. Нажмите на кнопку «Нагрев» один раз, чтобы включить минимальный уровень нагрева, при этом загорится индикатор «1». Нажмите на кнопку «Нагрев» второй раз, чтобы включить средний уровень нагрева, при этом загорится индикатор «2». Нажмите на кнопку «Нагрев» третий раз, чтобы включить максимальный уровень нагрева, при этом загорится индикатор «3». Чтобы выключить нагрев, нажмите четвертый раз на кнопку «Нагрев», индикаторы кнопки «Нагрев» погаснут.
 6. Чтобы выключить прибор, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», индикатор кнопки «Вкл/Выкл» погаснет, массажер выключится.
- Один сеанс массажа длится 15 минут, далее прозвучит звуковой сигнал и работает автоотключение.

Если хотите начать новый сеанс, то во избежание перегрева устройства подождите 10–15 минут и нажмите на кнопку «Вкл/Выкл».

Меры предосторожности по применению

1. Прибор не является медицинским средством и используется только в профилактических целях.
2. Перед использованием необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.
3. Существует ряд противопоказаний к применению, таких как:
 - беременность;
 - варикозное расширение вен, тромбофлебит;
 - нарушение целостности кожных покровов в месте воздействия (наличие ран, порезов, ожогов и т.д.);
 - нарушение свертываемости крови, прием лекарственных препаратов, влияющих на скорость свертывания;
 - обострение хронических заболеваний;



- онкология;
 - травмы, переломы;
 - остеопороз;
 - наличие электронных устройств при заболевании сердца, например, кардиостимулятора;
 - недавняя операция или ввод инъекций;
 - гипертония;
 - грипп, ОРВИ, повышение температуры;
 - почечная недостаточность;
 - сахарный диабет;
 - гипогликемия;
 - слабость, нервозность;
 - детский возраст;
 - переутомление.
4. Массаж должен быть умеренно сильным и приятным. Если во время массажа вы ощущаете дискомфорт или боль в ногах, прекратите массаж. Если дискомфорт или боль не проходят длительное время, проконсультируйтесь с врачом.

Чистка и обслуживание

Перед чисткой и обслуживанием всегда выключайте массажер и отключайте его от сети. Протирайте корпус прибора слегка влажной, а затем сухой мягкой тканью.

Не погружайте прибор в воду или под струю воды. Не допускайте попадания жидкостей в корпус прибора, на массажные ролики, на шнур питания или в область панели управления.

Допускается стирать съемные тканевые чехлы вручную при температуре не выше 40 °С. Также их можно стирать в стиральной машине в режиме деликатной стирки при температуре не выше 40 °С. После стирки дайте чехлам высохнуть естественным путем и вставьте их обратно в отверстия массажера, закрепив молнией.

Уход и хранение

Храните массажер в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. На длительное хранение уберите массажер в пакет или коробку для защиты от пыли.

Устранение неполадок

Устройство не включается, индикаторы не горят

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети

Неприятные ощущения во время массажа

Возможная причина	Решение
Установлена высокая интенсивность массажа	Установите более низкую интенсивность массажа или попробуйте сменить режим

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 40 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: II
4. Количество режимов: 9
5. Размер стопы: 35–47
6. Тип массажера: разминающий, вибрационный
7. Уровень шума: 40–48 дБ
8. Длина шнура: 1,6 м
9. Размер устройства: 440 × 440 × 420 мм
10. Размер упаковки: 560 × 500 × 470 мм
11. Вес нетто: 9,2 кг
12. Вес брутто: 10,4 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Цзиньхуа Синбу Текнолэджи Ко., Лтд. Билдинг 1, Сяцзе Вилидж, Сяошунь Таун, Цзиньдун Дистрикт, Цзиньхуа Сити, Чжэцзян, Китай.

Импортёр: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.



Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя массажера вследствие попадания жидкостей в массажер, на шнур питания, а также в область панели управления не является гарантийным случаем.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного износа массажера или несоответствующего использования.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте массажер только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите массажер, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур при отключении от розетки.

6. Не используйте устройство, если шнур питания или другие части массажера повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться массажером только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с массажером.
8. Контролируйте работу массажера, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не включайте массажер более 15 минут подряд. Это может привести к повреждению устройства.
10. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время, или перед проведением обслуживания.
11. Устанавливайте массажер только на устойчивую горизонтальную поверхность вдали от нагревательных элементов на расстоянии не менее 10 см от стены и других предметов.
12. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
13. Не допускайте падения массажера и не подвергайте его ударам.
14. Храните устройство в недоступных детям местах.
15. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
16. При повреждении шнура питания его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.



Kitfort

Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87